

Transparenter Gesichtsschutz / Face Shield

Ein persönliches Face Shield schirmt Ihr Gesicht vor Sprühnebel und Spritzern ab.

Die Gesichtsvisiere bedecken auch Stirn und Kinn. Unter den Gesichtsvisieren kann bequem eine Maske oder eine Brille getragen werden, ohne Ihre Sicht zu beeinträchtigen. Die verstellbare Kopfhalterung aus Gummi und die Schaumstoffpolsterung sorgen für einen sicheren und angenehmen Sitz. Die Gesichtsvisiere werden bereits zusammengesetzt geliefert. Reinigen Sie die Gesichtsvisiere vor dem Gebrauch mit einem weichen Tuch und milder Seife oder mildem Waschmittel.

Tragen des Gesichtsvisiers

Wir raten Ihnen, die nachfolgenden Hinweise zu beachten, damit Sie Ihr Gesichtsschild korrekt reinigen sowie auf- und absetzen.

Aufsetzen des Gesichtsvisiers:

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser (oder einem Handdesinfektionsmittel), bevor Sie das Gesichtsvisier anfassen.
2. Halten Sie das Gesichtsvisier so an Ihr Gesicht, dass die Schaumstoffpolsterung Ihre Stirn berührt.
3. Ziehen Sie das Gummiband über Ihren Kopf.
4. Verstellen Sie das Band, bis das Visier Ihr gesamtes Gesicht bedeckt und bequem anliegt.

Absetzen des Gesichtsvisiers:

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser (oder einem Handdesinfektionsmittel), bevor Sie das Gesichtsvisier anfassen.
2. Fassen Sie nach hinten an das Gummiband. Berühren Sie nicht die Vorderseite Ihres Visiers (sie könnte kontaminiert sein).
3. Heben Sie das Gummiband hoch und nach vorn über Ihren Kopf und setzen Sie das Visier von Ihrem Gesicht ab.
4. Entsorgen Sie Ihr Gesichtsvisier oder reinigen sie es leicht mit Wasser oder Desinfektionsmittel.
5. Waschen Sie Ihre Hände erneut mit Seife und Wasser (oder einem Handdesinfektionsmittel).

Es wird keine Haftung oder Gewährleistung insbesondere bezüglich der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck übernommen.

Merkmale:

- Gehäuse aus Polyethylen hoher Dichte, das verhindert, dass Chemikalien, Speicheltropfen und Farben in die Augen spritzen. Dies schützt die Augen und das Gesicht gut.
- Voll verstellbarer Kopfgurt aus Kunststoff für das Visier, der sich leicht auf und ab bewegen lässt und gut zu den meisten Schutzbrillen und Atemschutzmasken passt.
- Extrem leicht und kann in verschiedenen Situationen eingesetzt werden, z. B. bei

Laborarbeiten, Holzarbeiten, Mähen, Gartenarbeiten, Bohren, Schleifen, Schweißen, Sport im Freien usw.

- Volle Abdeckung: Die gesamte Länge bietet eine umfassendere Abdeckung als typische Gesichtsschutzschilde. Das Rundum-Design bietet Schutz über der Oberseite, der Seite und der Vorderseite. Passage von der Stirn zum Kinn.

Spezifikation:

Abmessungen: 32 x 22,5 cm

Material: PET + Schwamm

Einsatzbereich: Geeignet für den Einsatz in Arbeitsumgebungen, in denen ein Gesichtsschutz erforderlich ist.

(Hinweise: Berühren Sie nach dem Entfernen des Schutzfilms von der Schutzmaske die Schutzfolie während der Handhabung nicht so weit wie möglich, um das Gesichtsfeld nicht zu beeinträchtigen.)

Benutzung:

Nehmen Sie einfach das Visier aus der Verpackung, entfernen Sie die Schutzfoliensicht auf beiden Seiten der Schutzfolie und tragen Sie sie direkt auf dem Kopf.

- Schützen Sie effektiv Ihr Gesicht (Maße: 28x20cm)
- Der Gesichtsschutz besteht aus hochwertigem Polymermaterial und beschlägt nicht!
- Das Gesichtsschutzvisier kann leicht mit Wasser oder Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Leicht und angenehm zu tragen, zudem schnell und einfach anzuziehen & auszuziehen.
- Der Schaumstoffstreifen und die Befestigungsvorrichtung halten den Schutz vom Gesicht fern und bieten Platz für eine Brille.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) – Infos aus dem Internet.

F: Ist das Gesichtsvisier für den medizinischen Gebrauch geeignet? Können medizinische Fachkräfte das Gesichtsvisier zum Schutz gegen COVID-19 verwenden?

A: Nein. Diese Gesichtsvisiere sind ausschließlich für den nichtmedizinischen Eigengebrauch bestimmt. Sie sind zwar für Mitarbeiter des Gesundheitswesens und die Öffentlichkeit von Nutzen, doch sie entsprechen nicht den Anforderungen der Gesundheitsbehörde oder den Standards für persönliche Schutzausrüstung. Diese Gesichtsvisiere sind nicht für folgende Zwecke bestimmt: antimikrobieller oder antiviraler Schutz, Infektionsschutz oder Reduktions- oder Strahlenschutz.

F: Bleibt genügend Platz, um etwas Anderes unter dem Gesichtsvisier zu tragen?

A: Ja, unter dem Gesichtsvisier können Sie eine Brille und eine Stoffmaske tragen, ohne Ihre Sicht zu beeinträchtigen.

F: Kann ich das Gesichtsvisier wiederverwenden?

A: Wir empfehlen, das Gesichtsvisier nur einmal zu verwenden. Das Gesichtsvisier sollte nach Gebrauch oder Kontamination entsorgt werden.

F: Bieten Sie die Gesichtsvisiere in unterschiedlichen Größen und Farben an?

A: Nein. Momentan ist das Gesichtsvisier nur in einer Größe und nur in transparenter Ausführung erhältlich.

F: Werden die Gesichtsvisiere bereits zusammengesetzt geliefert?

A: Ja. Sie werden inklusive Schaumstoffpolsterung und Gummiband geliefert.

F: Kann ich die Gesichtsvisiere an örtliche Krankenhäuser oder medizinische Pflegeeinrichtungen spenden?

A: Wenn Sie diese Gesichtsvisiere spenden möchten, fragen Sie am besten zunächst beim Krankenhaus oder der jeweiligen Einrichtung nach, ob dort Spenden angenommen werden – und falls ja, welche Gesichtsvisiere dort akzeptiert werden. Bedenken Sie bitte, dass diese Gesichtsvisiere für den Eigengebrauch bestimmt sind. Sie erfüllen nicht die von der Gesundheitsbehörde festgelegten Regulierungsstandards für Medizinprodukte oder persönliche Schutzausrüstungen.

